

Băng Quấn Cổ Chân

- Băng cổ chân được thiết kế bởi vật liệu Neoprin với khóa Velcro có thể điều chỉnh sử dụng dễ dàng.
- Chất liệu Neoprin giữ nóng giúp cho mau chóng lành các trường hợp viêm, chấn thương.
- Băng cổ chân hỗ trợ khớp cổ chân nhẹ nhàng, được chỉ định trong các trường hợp đau, viêm khớp, giãn dây chằng hoặc chấn thương nhẹ khớp cổ chân cũng như sau nắn trật khớp cổ chân.

- **cách đeo sản phẩm:**



Bước 1
Luồn băng vào gót chân



Bước 2
Quấn 1 vòng quanh bàn chân



Bước 3
Quấn quanh cổ chân