

Nếu lo ngại việc mất cảm giác hưng phấn khi sử dụng bao cao su thông thường, thì Durex Fetherlite chính là giải pháp hoàn hảo nhất bởi độ dày chỉ 0,05mm sẽ tạo cảm giác chân thật hơn. Durex Fetherlite được làm từ cao su cao cấp, đã được kiểm nghiệm độ an toàn và độ bền cho việc sử dụng sản phẩm. Đây chính là sản phẩm giúp cuộc yêu của các cặp đôi trở nên nồng nàn và chân thật nhất.



Bao Cao Su Durex Fetherlite

Thành phần của bao cao su Durex Fetherlite

Mủ cao su thiên nhiên.

Kích thước: 52,5 mm.

Công dụng của bao cao su Durex Fetherlite

[Phòng tránh thai](#) và các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.

Liều dùng

Cách dùng

Xé dọc một bên gói, tránh làm rách bao cao su bên trong.

Mang bao cao su vào khi dương vật cương.

Ngay sau khi xuất tinh, rút dương vật ra khi vẫn còn đang cương bằng cách giữ chặt bao cao su.

Chỉ tháo bao cao su ra khi dương vật đã được rút ra hoàn toàn.

Gói bao cao su lại và bỏ vào thùng rác. Không được bỏ vào bồn cầu.

Đối tượng sử dụng

Phù hợp với mọi đối tượng nam giới từ 18 trở lên

Tác dụng phụ

Chưa có thông tin về tác dụng phụ của sản phẩm.

Lưu ý

Chỉ được sử dụng bao cao su Durex một lần.

Không có biện pháp tránh thai nào có thể giúp bạn ngăn ngừa việc [mang thai](#) 100%, cũng như việc [lây nhiễm HIV](#) và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

Quy cách

Hộp 12 cái

Nhà sản xuất

Durex

Nước sản xuất

THAILAND