

[bao cao su](#) Durex Performa Hộp 12 Cái có chứa Benzocaine 5% có tác dụng gây tê giúp cuộc yêu kéo dài, đem lại cảm giác thăng hoa cho người sử dụng. Chất liệu cao su thiên nhiên cao cấp nên độ bền và tính an toàn cao, giúp các cặp đôi cùng nhau trải qua những cảm giác hạnh phúc mà không kém phần an toàn. Với hộp 12 Cái tiện dụng hơn, không còn lo lắng gián đoạn cuộc yêu.



Bao Cao Su Durex Performa

Thành phần của bao cao su Durex Performa

Mủ cao su thiên nhiên.

Công dụng của bao cao su Durex Performa

Phòng tránh thai và [các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục](#).

Kéo dài "cuộc yêu" như ý muốn.

Liều dùng

Cách dùng

Xé dọc một bên gói, tránh làm rách bao cao su bên trong.

Mang bao cao su vào khi dương vật cương.

Ngay sau khi xuất tinh, rút dương vật ra khi vẫn còn đang cương bằng cách giữ chặt bao cao su.

Chỉ tháo bao cao su ra khi dương vật đã được rút ra hoàn toàn.

Gói bao cao su lại và bỏ vào thùng rác. Không được bỏ vào bồn cầu.

Đối tượng sử dụng

Phù hợp với mọi đối tượng nam giới từ 18 trở lên

Tác dụng phụ

Chưa có thông tin về tác dụng phụ của sản phẩm.

Lưu ý

Chỉ được sử dụng bao cao su Durex một lần.

Không có biện pháp tránh thai nào có thể giúp bạn ngăn ngừa việc [mang thai](#) 100%, cũng như việc lây nhiễm [HIV](#) và các bệnh lây truyền qua đường tình dục.

Bảo quản

Bảo quản nơi mát, khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp.

Quy cách

Hộp 12 cái

Nhà sản xuất

Durex

Nước sản xuất

THAILAND