

Thành phần Beyond Plus Kelosil Silicone Scar Gel

- Cyclopentasiloxane, Dimethicone, Aqua, Cocamidopropyl betaine, PEG-75 lanolin, Fragrance.

Chỉ định Beyond Plus Kelosil Silicone Scar Gel

- Gel Silicone Kelosil được phát triển để làm mờ vết sẹo hiệu quả trên mọi loại sẹo như do phẫu thuật, tai nạn, chấn thương, vết cắn mụn trứng cá, do bỏng lửa và các bệnh khác của da.
- Khuyến cáo lâm sàng quốc tế về điều trị sẹo đã nêu Gel Silicone nên được sử dụng như là liệu pháp đầu tiên về giải pháp sẹo và ngăn ngừa sẹo phì đại và sẹo lồi.
- Gel Kelosil an toàn cho mọi loại và cho trẻ em.

Liều dùng Beyond Plus Kelosil Silicone Scar Gel

- Sử dụng ngày 2 lần - thời gian cho kết quả tốt trong hơn 90 ngày.
- Làm sạch vết sẹo bằng xà phòng nhẹ và nước. Sau đó lau khô.
- Ép một lượng gel Kelosil trên đầu ngón tay và áp dụng vào khu vực sẹo. Sau đó thoa rộng gel ra lên vùng bị ảnh hưởng đến khi gel được tán đều.
- Mát xa gel lên vùng ảnh hưởng cho đến khi nó hoàn toàn khô trong 1 - 2 phút.
- Khi đã khô lớp silicone, có thể dùng mỹ phẩm hay kem chống nắng trang điểm.
- Nếu không khô trong vòng 2 phút, nó có nghĩa là bạn dùng quá nhiều gel lên vùng sẹo. Lau phần gel thừa và mát xa cho đến khi nó khô lại.

Chống chỉ định Beyond Plus Kelosil Silicone Scar Gel

- Kelosil không được dùng chữa bỏng da, vết thương hở.
- Kelosil không dùng tiếp xúc với màng nhày hay vùng mắt.
- Kelosil không dùng chung với phương pháp điều trị da khác mà không có sự tư vấn của Bác sĩ.
- Kelosil có thể gây ố quần áo nếu không hoàn toàn khô.

- Chỉ sử dụng ngoài da. Nếu kích ứng xảy ra, ngừng sử dụng và tham vấn ý kiến Bác sĩ

Thận trọng Beyond Plus Kelosil Silicone Scar Gel

- Nếu kích ứng xảy ra, ngừng sử dụng và tham vấn ý kiến Bác sĩ. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Đặc điểm

- Gel Silicone Kelosil giải pháp hiệu quả cho sẹo.
- Gel Silicone Kelosil là loại gel silicone không thấm khí, khác với các loại gel thông thường. Gel Silicone hiệu quả cho việc làm mờ sẹo khi sử dụng đúng chỉ dẫn.
- Gel Silicone Kelosil phải được áp dụng trên da sạch và khô, đảm bảo vết thương hoàn toàn kín trước khi dùng. Vì vậy sử dụng Kelosil ước tính 2 tuần sau khi vết thương lành.
- Gel Silicone Kelosil là gel tự khô, không rích, được nghiên cứu và phát triển để làm mờ các vết sẹo kể cả sẹo cũ và sẹo mới. Gel Silicone Kelosil được dùng cho mọi loại da bao gồm khu vực tiếp xúc như mặt, cổ và các khớp. Khi được dùng theo chỉ dẫn, Gel Kelosil khô lại, tạo một tấm gel silicone, một lớp bảo vệ không thấm khí, chống thoát nước bảo vệ vết sẹo từ sự xâm nhiễm các chất hóa học, vi khuẩn, cho phép sẹo bình thường hóa quá trình tổng hợp collagen và tạo ra lớp da da mới thay thế tốt hơn.
 - **Xuất xứ :** [Thái Lan](#)