

Giác Hơi Vali Đen Duy Thành được sử dụng để giảm đau lưng, đau đầu, cảm cúm, nhức mỏi... là sản phẩm rất an toàn, tiện lợi cho gia đình.

Hướng dẫn sử dụng:

1. Úp miệng ly vào vị trí cần giác, đặt đầu bơm giác trùm lên đuôi ly, ấn mạnh vào thành ly và bơm giác được nối kín lại.
2. Bằng động tác co bóp, dùng bốn ngón tay tì sát vào cán bơm, kéo sát vào lòng bàn tay, để tăng lực hút, có thể bơm (2 – 3 lần) tùy thuộc và sức chịu đựng của người được giác, (mỗi lần được bơm áp suất tạo ra từ 0.8kg/cm² đến 1kg/cm²)
3. Khi lực hút vừa đủ, chỉ cần rút bơm ra khỏi đuôi ly, ly giác lưu lại trên da lâu hoặc mau tùy thích của người được giác (khoảng 3-5phút)
4. Sau khi kéo đầu bơm rời khỏi đuôi ly. Dùng ngón tay trở ấn nhẹ vào đầu của đuôi ly.
5. Muốn lấy ly giác ra, chỉ cần dùng hai ngón tay kéo nhẹ vào đuôi van ở đáy ly, ly giác lập tức rời khỏi da.
6. Trường hợp ly giác không hút, đề nghị Quý khách đẩy sát phốt đỏ lên đuôi ly.
7. Sau khi giác xong, Quý Khách mới xoa dầu.
8. Nên dùng cồn y tế để khử trùng ly giác.
9. Trước khi gắn bơm hút vào ly giác nên nhớ dùng tay kéo nhẹ tige của ly giác lên.