

Điện châm - châm cứu là phương pháp chữa bệnh phối hợp tác dụng chữa bệnh của châm cứu với việc kích thích bằng các loại dòng điện khác nhau như một chiều, cảm ứng xung đột một pha hay hai pha, đều hay không đều.

Hiện nay, người ta thường dùng máy phát ra xung điện (Blocking ge'ne'rator) có tần số thất điện thể thấp có nhiều đầu dây kích thích, tính năng ổn định an toàn, điều chỉnh thao tác dễ dàng và đơn giản.

Thông tin cơ bản máy châm cứu 6 cọc 12 kim KWD-808-I:

- Tên sản phẩm: Máy châm cứu 6 cọc 12 kim
- Mã sản phẩm: KWD-808-I
- Hãng sản xuất: Wunjin Greatwall Medical
- Nước sản xuất: Trung quốc

Chỉ dẫn các từ tiếng Anh:

- Det out: nơi cắm giắc của cây dò huyết
- APD: Nút chỉnh dòng dò huyết
- Power: Công tắc nguồn chính của máy
- Timer: Nút chỉnh thời gian hoạt động của thiết bị KWD-808-I
- FREQ: Nút chỉnh tần số
- OUTPUP LAMP: Đèn tần số
- WRS (5): Điều chỉnh hiển thị sóng xung điện (5 loại sóng)
- OUTPUT REGULATOR: Điều chỉnh cường độ
- 6 OUTPUT: 6 Ngõ ra giắc cắm 12 kim
- POWER LAMP: Đèn nguồn điều chỉnh cây dò huyết
- DET: Khởi động dò huyết
- PLUG: Giắc cắm đầu dò huyết
- HOLDER: Thân cầm cây dò huyết
- DETECTING HEAD: Đầu dò huyết

Nguyên lý hoạt động:

Máy châm cứu KWD-808 hoạt động dựa trên nguyên lý kỹ thuật xung điện với 5 loại sóng:

1. Sóng liên tục
2. Sóng không liên tục
3. Sóng nén

4. Sóng dao động lên xuống
5. Sóng tắt mở

Tần số xung điện dao động từ 1,2Hz - 55Hz và bề rộng của bước sóng từ 0,6ms.

Hướng dẫn sử dụng:

Châm cứu:

1. Bật công tắc nguồn
2. Cắm dây châm cứu vào giắc cắm
3. Điều chỉnh cường độ và tần số thích hợp.

Dò huyết:

1. Gắn cây dò huyết vào giắc cắm dò huyết
2. Bấm nút dò huyết
3. Di chuyển đầu dò huyết vào các vị trí thích hợp.

Chống chỉ định:

1. Không được dùng cùng lúc với các thiết bị điện khác trên cơ thể
2. Không được dán điện cực xung quanh vùng ngực
3. Không được dùng máy này với thiết bị có tần số cao cùng lúc. Nếu dùng cùng lúc có thể xảy ra bỏng hoặc là hư thiết bị
4. Không được dùng gần lò vi sóng sẽ làm sóng rung không ổn định.

Cảnh báo thận trọng:

1. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng
2. Đảm bảo nguồn điện sử dụng cho máy là phù hợp
3. Không được đặt điện cực trên vùng có vết thương, vùng da bị sẹo mới hay vùng da đang bị viêm
4. Không đặt cùng lúc 2 điện cực ở chiều trái và phải của ở nửa phần trên của cơ thể cùng lúc tránh dòng điện tác động vào tim.

Các phụ kiện kèm theo máy:

- 4 dây châm cứu
- 1 cây dò huyết
- 2 dây gắn điện cực dán

- 4 điện cực dán (2 cặp)
- 1 adaptor 220V
- 1 cảm nang sử dụng

Chú ý:

- Thiết bị được bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua.
- Chỉ bảo hành máy hư do lỗi của nhà sản xuất. Không bảo hành máy hư do thiên tai, bất cẩn hay cố ý, sử dụng sai hướng dẫn theo máy, sửa chữa nơi khác, tem bảo hành dán trên sản phẩm không còn nguyên vẹn.
- Chỉ bảo hành máy chính, không bảo hành các phụ kiện đi kèm.
- Vui lòng trình phiếu bảo hành khi có nhu cầu kiểm tra máy.
- Sản phẩm máy châm cứu 6 cọc 12 kim KWD-808-I được bảo hành 12 tháng.

Thông số kỹ thuật

1. Nguồn điện: 220V - 50Hz hoặc sử dụng pin 9V
2. Nguồn điện đầu vào: <50VA
 - KWD-808I có 6 giắc cắm.
 - Phân loại theo kiểu chống sốc: KWD-808 thuộc thiết bị cấp 2 với nguồn cung cấp điện bên trong.
 - Phân loại theo mức độ chống sốc: KWD thuộc thiết bị BF
 - Phân loại theo mức độ ngăn cản chất lỏng có hai: KWD-808 thuộc thiết bị thông thường
 - Phân loại theo hệ thống làm việc: KWD-808 thuộc trạng thái hoạt động liên tục.
 - Cầu chì: thấp hơn 10,5A
 - Tần số xung: 1,2Hz - 55Hz +/-30%