

Máy Đo Đường Huyết Accu-chek Instant mmol/L được thiết kế sử dụng cho cá nhân và cơ sở

Y tế với các ưu điểm sau:

- Không cần code (mã hóa máy và que thử) và MỘT nút cho mọi chức năng
- Sử dụng công nghệ mao dẫn với vùng lấy máu rộng, giúp việc hút máu vào que dễ dàng
- Độ chính xác, đáp ứng vượt tiêu chuẩn ISO 15197: 2013 với 99% kết quả đo nằm trong vòng ± 0.56 mmol/L (nồng độ dưới 5.56mmol/L) hoặc $\pm 10\%$ (nồng độ từ 5.56 mmo/L trở lên)
- Màn hình LCD rộng với màu sắc tương phản giúp nhìn rõ kết quả đo ngay cả trong bóng tối
- Dải chỉ thị đường huyết mục tiêu giúp hiểu rõ ý nghĩa của kết quả đo
- Sử dụng với bút lấy máu Accu-chek Softclix giúp việc lấy máu ít đau và nhẹ nhàng

Hướng dẫn sử dụng

- Sử dụng máy ở nhiệt độ +4 đến +45 độ C và độ ẩm 10% đến 90%
- Sử dụng cùng với que thử Accu-chek Instant để đo nồng độ đường trong máu toàn phần
- Có thể sử dụng cho cá nhân hoặc tại cơ sở Y tế (Khi sử dụng tại cơ sở Y tế, cần sử dụng thiết bị lấy máu chuyên dùng)
- Có thể sử dụng với máu mao mạch, máu tĩnh mạch, động mạch hoặc máu trẻ sơ sinh (Máu tĩnh mạch và máu trẻ sơ sinh chỉ dùng tại cơ sở y tế)
- Đọc kỹ hướng dẫn và tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất trước khi dùng

Hướng dẫn bảo quản

- Có pin: từ +4 đến 30 độ C
- Không có pin: -25 độ C đến +70 độ C
- Không để máy gần nơi có từ trường, độ ẩm cao và không làm rơi máy.

Quy cách đóng gói

1 máy đo (kèm pin), 1 bút lấy máu Accu-chek Softclix dùng cho cá nhân, 1 bao đựng máy, tài liệu hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và hộp que thử tặng kèm

Trọng lượng: 200g

Kích thước: 20 x 7 x 17 cm (D x R x C)