

### **1. Chức năng + chỉ định :**

- Dùng trong các trường hợp chấn thương cổ không cần đến cố định hoàn toàn mà chỉ cố định nhẹ nhàng và hạn chế vận động.
- Có thể dùng trong cấp cứu giảm sự đau đớn trong các chấn thương cơ, gân ở cổ và đốt sống cổ.
- Sau phẫu thuật mạch máu, cân cơ vùng cổ.

### **2. Vật liệu:**

- Mút xốp mềm, nhẹ và thoáng khí.
- Vải cotton, khoá Velcro.

### **3. Bảo quản:**

- Để nơi khô mát.
- Có thể giặt bằng tay trong nước xà phòng, phơi khô nơi thoáng.
- Không giặt và làm khô bằng máy (không dùng thuốc tẩy).