

Nẹp Ngón Tay A6 được làm từ chất liệu neoprene, khóa velcro tự dính, thanh nhôm có thể được uốn cong theo đường cong sinh lý ngón tay. Sản phẩm được sử dụng cho ngón trỏ, ngón giữa, ngón nhẫn. Sản phẩm dùng cho cả tay trái và tay phải

- Hỗ trợ ngón tay trong các trường hợp bong gân, trật khớp, viêm khớp viêm gân ngón tay.
- Hỗ trợ sau phẫu thuật viêm bao gân duỗi ngón trỏ, ngón giữa và ngón nhẫn (hay còn gọi ngón tay cò súng, ngón tay lò xo, viêm hẹp gân gấp...)

Hướng dẫn sử dụng

1. Mở sản phẩm ra và định vị ngón tay cần nẹp.
2. Dán dây đai đầu ngón tay
3. Kéo và dán dây đai phía dưới cổ tay
4. Kéo và dán chặt dây đai còn lại

Bảo quản

Giặt bằng tay, không giặt máy, không dùng chất tẩy, bảo quản nơi thoáng mát.