

Mô tả

Que thử MediSmart sử dụng máy đo đường huyết MediSmart Sapphire:

- Que thử của máy đo đường huyết MediSmart Sapphire gồm 25 que được đựng trong hộp kín nên đảm bảo độ tin cậy cao.
- Cho kết quả nhanh, chính xác trong vòng 5 giây.
- Que thử đường huyết MediSmart Sapphire tự động hút máu, với lượng máu cho phép 0.6µl (microliter).
- Nếu phải sử dụng thường xuyên, khách hàng có thể mua que thử của máy đo đường huyết MediSmart Sapphire (cách quy: 25que/lọ - hộp 50 que).

Lưu ý khi sử dụng que thử của máy đo đường huyết MediSmart Sapphire:

- Bạn nên dò code que thử mỗi lần mở một lọ que thử mới.
- Giữ que thử trong lọ nguyên của nó.
- Đậy nắp hộp thật chặt ngay sau khi lấy que thử ra để giữ que thử được khô.
- Sử dụng que thử trong vòng 3 phút kể từ lúc lấy ra khỏi hộp.
- Que thử chỉ sử dụng được 1 lần, không sử dụng lại.
- Ghi lại ngày mở lọ que thử để kiểm tra ngày hết hạn trên lọ que thử.
- Que thử chỉ sử dụng tốt trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở lọ hoặc ngày hết hạn sử dụng.
- Không làm lạnh que thử.
- Không đưa máu hoặc dung dịch thử vào que thử trước khi bạn lắp vào máy.
- Không được chạm vào que thử bằng tay ướt.
- Không sử dụng que thử quá hạn (hạn dùng que thử được ghi trên lọ que thử).
- Không được bẻ cong, cắt hoặc vặn que thử.