

Que thử đường huyết EasyGluco chỉ được sử dụng với máy đo đường huyết EasyGluco nhằm để đo chỉ số glucose trong máu toàn phần mới lấy. Hệ thống máy EasyGluco được chuẩn huyết tương cho phép so sánh các kết quả được dễ dàng so với các phương pháp phòng thí nghiệm.

Que thử đường huyết EasyGluco đại diện dòng máy kỹ thuật thiết bị cảm biến sinh học mới được kết hợp từ các thiết bị điện hóa và yêu cầu mức thể tích máu nhỏ (1.5 μ L), giúp bạn ít bị đau.

Lưu trữ và các xử lý cần lưu ý:

- Lưu trữ hộp que thử đường huyết EasyGluco ở nơi thoáng mát, khô ráo và nhiệt độ khoảng 2-30 $^{\circ}$ C. Tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Không được để đông lạnh. Không sử dụng các que thử trong điều kiện bảo quản không đúng như đã nêu.
- Chỉ bảo quản que thử trong hộp còn nguyên. Không đặt que thử vào hộp chứa mới hay bất cứ hộp nào khác.
- Đóng nắp hộp thật chặt ngay lập tức, sau khi lấy que ra. Việc này giúp giữ que vẫn hoạt động đúng chức năng cho tới hạn sử dụng.
- Sử dụng que ngay sau khi lấy que ra khỏi hộp.
- Không dùng các que thử đã hết hạn sử dụng mà đã được in trên hộp hoặc bao bì. Nếu không thì các kết quả đo sẽ không chính xác.
- Khi mở hộp lần đầu, bạn cần ghi chú ngày mở hộp đầu tiên trên nhãn hộp. Các que thử đường huyết EasyGluco còn lại chỉ được sử dụng trong vòng 3 tháng kể từ ngày mở hộp đầu tiên.
- Tránh làm que thử bị dơ bẩn, bị dính nước hay thức ăn. Không được cầm que khi tay bị ướt. Chỉ dùng các ngón tay sạch và khô để cầm nắm que.
- Không được bẻ cong, cắt hoặc biến đổi dạng của que thử EasyGluco.
- Que thử đường huyết EasyGluco chỉ được sử dụng một lần.
- Không tiến hành đo đường huyết ở nhiệt độ dưới 10 $^{\circ}$ C hoặc trên 40 $^{\circ}$ C và độ ẩm trên 90%.

Quy cách: 25 que/lọ - 50que/hộp