

Với chất liệu băng PU dẻo, không thấm nước, chất tạo độ dính được tiết trùng và thành phần từ Hydrocolloid, miếng dán mụn Somaderm Spot giúp hút mụn nhưng không gây kích ứng da, duy trì độ ẩm cho da. Bên cạnh đó, sản phẩm còn giúp giảm thiểu khả năng hình thành sẹo và hỗ trợ nhanh lành vết thương. Ngoài ra, sản phẩm có thiết kế nhỏ, hình tròn, khó nhìn thấy khi dán trên mặt, đem lại sự tiện dụng và giúp người dùng tự tin hơn khi sử dụng.

Thành phần

Hydrocolloid

Công dụng

Giảm thiểu khả năng hình thành sẹo và hỗ trợ nhanh lành vết thương.

Hấp thụ dịch mô và duy trì độ ẩm trên vết thương, ngăn không cho xuất hiện phần chai cứng.

Thiết kế nhỏ, hình tròn, khó nhìn thấy khi dán trên mặt.

Sản phẩm không gây kích ứng, an toàn sử dụng cho da nhạy cảm.

Liều dùng

Cách dùng

Vệ sinh vùng mụn và rửa tay sạch sẽ sau đó lau khô.

Xé một miếng dán trị mụn ra.

Tháo nửa miếng giấy dán ở phía sau.

Dán phần giữa miếng dán vào mụn.

Tháo phần giấy còn lại của miếng dán trị mụn.

Ấn nhẹ miếng dán trị mụn từ 3 đến 5 giây để tăng độ dính và không bị lộ ra ngoài da.

Đối tượng sử dụng

Dùng được cho mọi đối tượng.

Hạn chế dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Tác dụng phụ

Chưa có ghi nhận về tác dụng phụ của sản phẩm.

Lưu ý

Hạn chế dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi.

Nếu dị ứng, nổi đỏ, ngứa phải dùng ngay.

Vết thương sâu, quá khổ và bệnh nhân tiểu đường không nên dùng.

Bảo quản

Bảo quản nơi khô mát.

Tránh ánh nắng trực tiếp.

Quy cách

Hộp

Nhà sản xuất

YOUNG CHEMICAL

Nước sản xuất

KOREA, REPUBLIC OF