

Vớ Y Khoa Mediven Comfort Đùi là dòng vớ y khoa cao cấp của medi. Thớ vải mịn hơn, mềm mại hơn, vớ nhiều màu sắc đẹp hơn, thời trang hơn để lựa chọn, thỏa mãn nhu cầu thời trang cho người suy tĩnh mạch.

Áp lực:

- CCL1: suy tĩnh mạch nhẹ và trung bình

- CCL2: suy tĩnh mạch nặng

- **mediven comfort (CCL1, CCL2)**: vớ hở ngón, mình vải mịn, phổ biến màu sand.

Độ bền của vớ 6 tháng.

CÁCH GIẶT VÀ BẢO QUẢN VỚ MEDI:

- Có thể giặt máy chế độ nước ấm (không quá 40°C)
- Không dùng chất tẩy
- Có thể sấy chế độ thấp
- Không giặt khô
- Không ủi

Dùng xà phòng giặt loại nhẹ. Không dùng nước xả mềm vải. Xả kỹ vớ với nước, không vắt xoắn mạnh tay. Không nên phơi trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời vì sẽ làm giảm độ bền đàn hồi của sợi trong vớ.